


סטנדרט Q

בדיקה לזיהוי אנטיגנים של COVID-19


בדיקת סטנדרט Q לזיהוי אנטיגנים של COVID-19 היא בדיקה לזיהוי איכותי של אנטיגנים נוקלאופורטאיניים ספציפיים ל SARS-Cov2-2 באף האדם

- **זמן בדיקה:** עד 15 קות
- **דגימה:** בדיקת מטוש מהאף
- **טמפרטורת אחסון:** 2-30°C


הליך הבדיקה

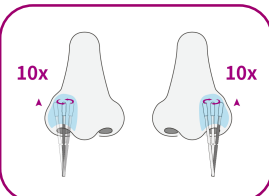


1 יש להחדיר מטוש סטרילי לשני הנחיריים של המטופל ולהגיע לעומק הנחיר.

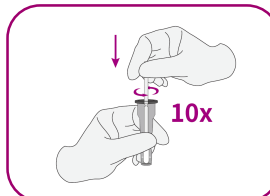

2 יש להכניס את המטוש לתוך מבחנת הבופר עם המיצוי, תוך לחיצה על מבחנת הבופר. יש לבצע ערבוב עם המטוש יותר מעשר פעמים.

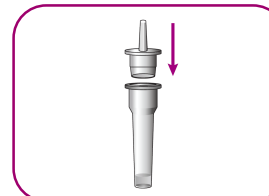

3 לאחר הוצאת המטוש יש ללחוץ את מכסה הזרבובית על פתח המבחנה ולסגור אותה היטב.

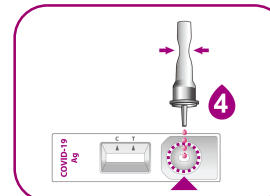

4 יש לטפסף ארבע טיפות של מיצוי הדגימה לבארית העגולה בקסטת הבדיקה.



לסרטון הדרכה יש לסרוק את הקוד
יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש



עד 15 דקות

5 תוצאה מיידיית לקריאה עד 15 דקות.

פענוח תוצאות הבדיקה

חיובי



חיובי לאנטיגן

שלילי



שלילי

לא תקין




לא תקין

C - פס ביקורת
T - פס בדיקה

כל הציוד הנדרש לביצוע הבדיקה נכלל בערכה



מטוש סטרילי

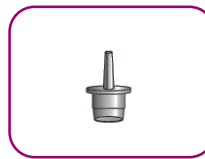

מכסה זרבובית



מבחנה עם בופר למיצוי



קסטת הבדיקה (ארז בנפרד בשקיק אלומיניום עם חומר ייבוש)

הכנה וביצוע של הליך הבדיקה

■ הכנה

- יש לקרוא בעיון את הוראות השימוש לבדיקת סטנדרט Q לזיהוי אנטיגנים של COVID-19.
- יש לבדוק את תאריך התפוגה המצוין על גב האלומיניום. אין להשתמש בערכה אם תאריך התפוגה עבר.
- יש לבדוק את מכשיר הבדיקה ואת אריזת הייבוש שבשקיק האלומיניום.

אין לקרוא את תוצאות הבדיקה לאחר 30 דקות.
עולות להתקבל תוצאות כוזבות

